



People.Health.Care.

Suprasorb[®] CNP P3
Terapia de Presión Negativa
Un solo sistema. Todas las opciones.

P3

Suprasorb[®]

Controlled
Negative
Pressure

CNP P3

Fácil de usar. Flexible.
Económico.

Hemos desarrollado aún más nuestra terapia de presión negativa para usted. Como proveedor de productos sanitarios y para higiene preparados para el futuro, hoy tenemos el gusto de presentarle un nuevo sistema de terapia de presión negativa. Fácil de usar, económico y ahora con muchas más opciones para realizar tratamientos y optimizar los procesos de curación.

CNP P3. Un solo sistema. Todas las opciones.

El sistema CNP P3 está adaptado a la práctica de la vida diaria. La operación de esta fiable unidad de terapia es muy sencilla y las pantallas tienen un diseño totalmente intuitivo. Nuestra interfaz de usuario le guía por todos los pasos de la Terapia CNP P3, así como por los ajustes y los modos de funcionamiento.

Confíe en los componentes perfectamente armonizados que le llevarán directamente a la herida. Desde aquí, puede decidir los siguientes pasos del tratamiento en función del caso de que se trate. Así, puede elegir entre las siguientes opciones innovadoras: drenaje profundo, película de drenaje y EasyDress.

**Paso a paso hacia la terapia apropiada:
su sistema de Terapia CNP P3.**

Su terapia, su sistema:

Suprasorb
CNP P3 Sistema para la terapia
de Presión Negativa
Visión global del sistema

Página 4–5

Suprasorb
CNP P3 Unidad de Presión
Negativa

Página 6–9

Suprasorb
CNP Drenaje profundo

Página 10



Suprasorb
CNP Película de drenaje

Página 11

Suprasorb
CNP EasyDress &
EasyDress Fixateur Externe

Página 12–13

Suprasorb
CNP Kits

Página 14–15

CNP P3 Terapia de Presión Negativa

Un solo sistema. Todas las opciones.

P3 Unidad de Presión Negativa

- pantallas intuitivos
- gráficos y textos durante el uso
- códigos de color informativos

Permite una manipulación intuitiva, ahorra tiempo y garantiza la seguridad.¹

PATENTE PENDIENTE DE APROBACIÓN

Drenaje profundo

- extrae el exudado de la parte más profunda de la herida²
- transporta hasta un 135 % más de líquido que los sistemas de extracción convencionales²
- mantiene constante la presión en lo más profundo de la herida²



PATENTADO

EasyDress Fixateur Externe

PATENTADO

PREMIO A LA INNOVACIÓN

EasyDress

- ocluye las heridas de las extremidades de forma fácil y fiable
- se vuelve hermético considerablemente más rápido que otros métodos adhesivos convencionales.
- protege la piel intacta que rodea la herida

PR3



Depósito y bolsa de exudado

en los tamaños de 250 ml y 1000 ml, permite:

- un uso económico
- ahorro de espacio de almacenamiento
- uso universal en hospitales y en entornos ambulatorios



PATENTE PENDIENTE DE APROBACIÓN

Conector Y

- permite dos puertos de extracción ventilados desde la zona de la herida²
- diseño estable en una sola pieza
- la conexión es fácil y rápida



Apósito de drenaje

- mejora del flujo
- resiliente a dobleces
- el tubo de aspiración puede cortarse a medida





PATENTADO

PREMIO A LA INNOVACIÓN

Película de drenaje

- protege órganos y estructuras delicadas
- magnífica capacidad de drenaje gracias al transporte del exudado por toda la superficie de la película
- se puede cortar y dar forma según sea necesario

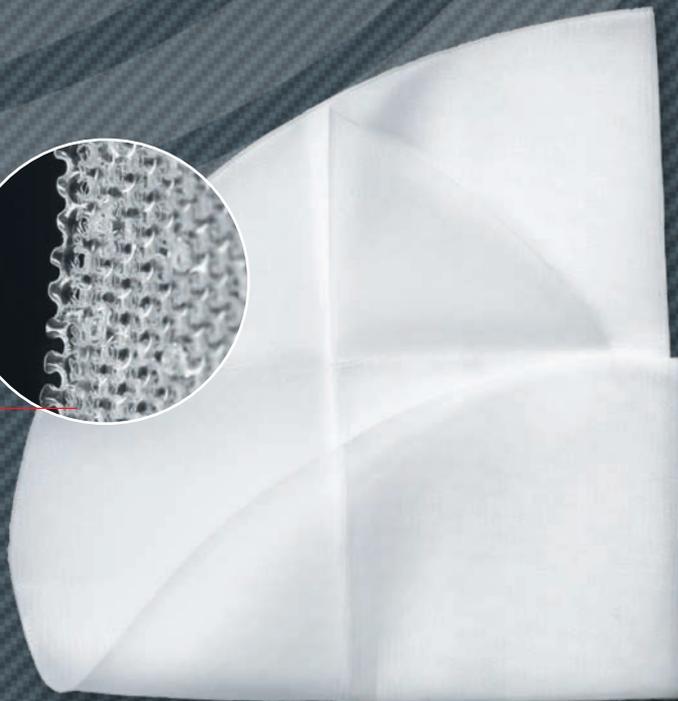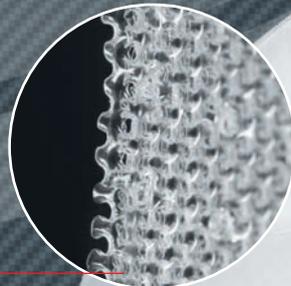

Suprasorb®

CNP P3 Unidad de Presión Negativa Universal. Ahorra tiempo.¹ Confiable.

La P3 es el corazón de la nueva terapia Suprasorb CNP. Su diseño es visualmente atractivo, moderno y funcional. Las superficies lisas y los bordes redondeados facilitan las labores de limpieza.

La P3 puede utilizarse en todo tipo de aplicaciones, tanto en hospitales como en entornos ambulatorios. La estructura compacta y los dos tamaños de depósito/bolsa de exudado abren un amplio espectro de aplicaciones. La unidad de terapia CNP P3 es una solución todo en uno para todas las opciones.



CNP es el acrónimo inglés de «Presión Negativa Controlada».

«Presión negativa controlada» es ahora un concepto más importante que nunca en el caso de la Terapia CNP.

Usando sus componentes de alta tecnología especialmente desarrollados, la P3 funciona de manera dirigida e individual. Controla de forma continua y fiable la presión negativa que se ha seleccionado y la mantiene en un nivel constante. Porque la «CNP» es hoy más real que nunca.

Muy fácil de usar.

La P3 presenta pantallas explicativas y una navegación clara por los menús. Su manejo es intuitivo, lo que permite trabajar de forma segura y ahorrando tiempo.¹

Económico. Diseñado teniendo en mente al usuario.

La economía en la forma de pensar, la producción y la actuación son elementos incuestionables para nosotros. Y, naturalmente, hemos aplicado este enfoque al diseñar el sistema Suprasorb CNP P3.

De este modo, ya no es necesario tener varios sistemas, pues el sistema Suprasorb CNP P3 puede utilizarse en todas las aplicaciones y para todos los requisitos de la terapia CNP. Además, la combinación de depósito/bolsa de exudado en dos tamaños se ha diseñado para que el mismo depósito pueda reutilizarse durante un largo período de tiempo. Solo es necesario reemplazar la bolsa de exudado y eliminar la usada, lo que reduce los requisitos de espacio de almacenamiento y disminuye también los costos que esto implica.

Es económico y está diseñado teniendo en mente al usuario.



Suprasorb®

CNP P3

La unidad de presión negativa intuitiva que es fácil de usar.

Barras LED

— La unidad de terapia funciona correctamente

— Mensaje de error

Modo terapia

Ajuste de presión

Ajuste de sensibilidad

Nivel de sellado

Bloqueo de la pantalla

LED de control para la fuente de alimentación

Botón de encendido y apagado


Tecla para silenciar la alarma

Depósito reutilizable de 250 ml con bolsa de exudado CNP de 250 ml (tamaño opcional: 1000 ml)



Los colores dicen más que las palabras

Los códigos de colores de la P3 permiten identificar rápidamente el modo de funcionamiento de la unidad de terapia: los ajustes se realizan sobre un fondo gris. Verde significa que la unidad de terapia está en funcionamiento. Una pantalla de color naranja significa que se ha hecho una pausa en la terapia. Si se muestra un color rojo, significa que ha ocurrido un mensaje de error que requiere su atención.

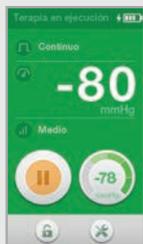

Terapia en ejecución



Terapia en pausa



Mensajes de error: los gráficos y el texto garantizan la claridad (ejemplo de error 1/8)



Modo terapia: selección de la opción de terapia, la presión y la sensibilidad

Modo terapia y ajuste de presión

La unidad de terapia P3 le permite elegir entre modo de terapia continua o intermitente. Los ajustes estándar para la terapia CNP también se guardan en la P3.

El modo de terapia y la presión pueden definirse en la sección de ajustes, en función de las necesidades de terapia.



Nivel de sellado

Mantenga la visión global. El nivel de sellado también comienza con la terapia. Este elemento circular con segmentos verdes muestra la acumulación de presión. A continuación, se muestra el nivel de sellado. Esto significa que el usuario se mantiene al día en lo que respecta a la calidad y al estado del apósito de presión negativa.


Importante: el estado ideal se ha logrado si la «pantalla de mmHg» del área de nivel de sellado coincide con el dígito grande del área de ajuste de presión.



Barras LED

La barra LED es una herramienta de orientación adicional, pues informa si es necesario realizar alguna acción o si todo funciona bien. Una barra LED verde significa que la unidad de terapia está funcionando correctamente. Si la barra LED es de color naranja, en la pantalla aparece al mismo tiempo un mensaje de error que indica la acción que debe realizarse.

Basta con echar un vistazo a la habitación del paciente para reconocer el color de la barra LED y, por lo tanto, el estado de la terapia.

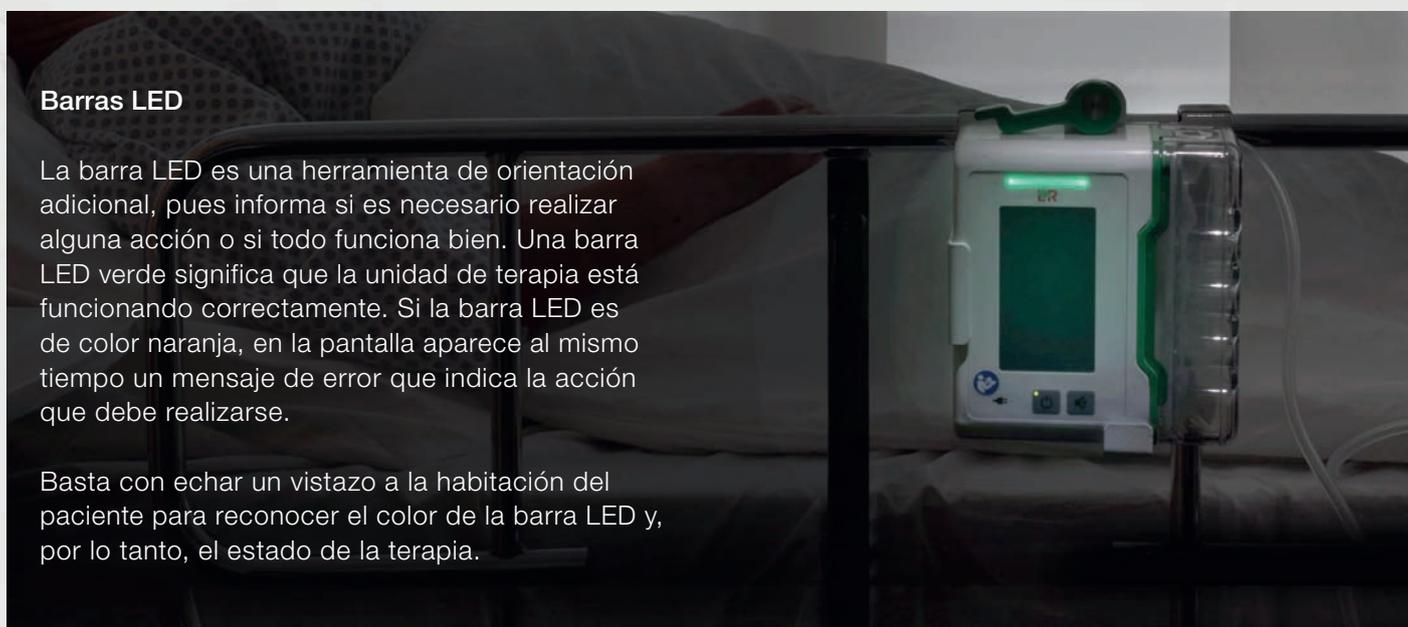

Suprasorb®


CNP Drenaje Profundo

La solución especial para llegar a lo más profundo de las heridas.

Un nuevo enfoque atrayente para la terapia de presión negativa

Se ha diseñado específicamente para el nuevo sistema que viene ventilado por control activo, siendo por lo tanto único en el mercado. El drenaje profundo Suprasorb CNP ofrece una alternativa inteligente y eficiente a las soluciones convencionales.

Se coloca directamente en la herida y, desde allí, el drenaje profundo extrae el exudado directamente de la herida.²


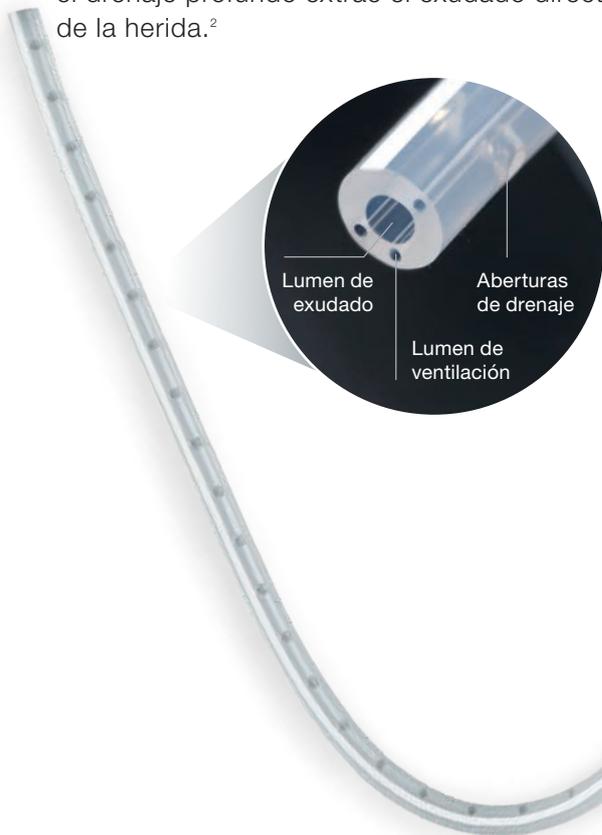


Visión global de las ventajas²

- El drenaje profundo comienza a extraer el exudado de una forma significativamente más rápida que las soluciones alternativas.²
- Gracias al drenaje profundo, es posible extraer una cantidad mayor de exudado de la herida que con otras soluciones en el mismo período de tiempo.²
- El drenaje profundo permite identificar los bloqueos durante toda la evolución, incluso en lo más profundo de la herida.²
- Durante las pruebas realizadas, el drenaje profundo Suprasorb CNP no solo superó a los sistemas de extracción superficiales convencionales de los competidores, sino también a las soluciones de drenaje profundo inherentes del sistema.²

PATENTE
PENDIENTE DE
APROBACIÓN

Durante un período de 120 minutos, el drenaje profundo Suprasorb CNP extrajo más de dos veces de exudado de lo más profundo de la herida que el sistema de extracción convencional del competidor de la superficie de la herida.²

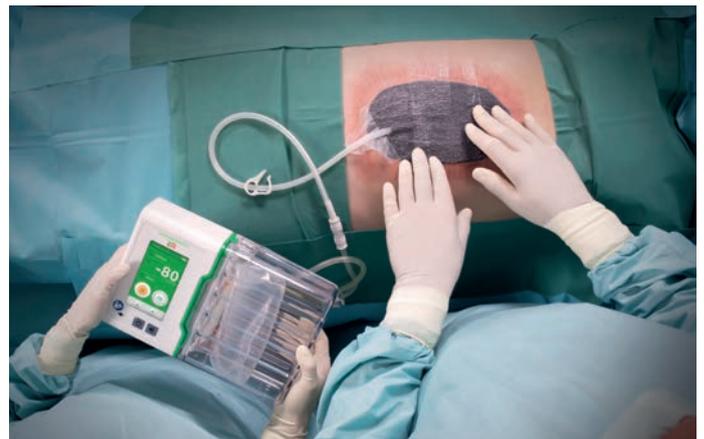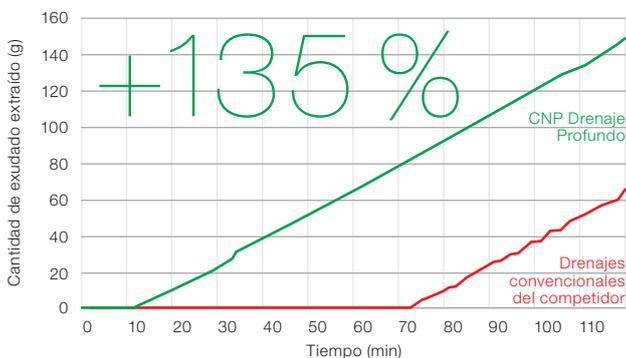

Suprasorb®

CNP Película de drenaje

Solución de alta tecnología. Para el abdomen abierto y las extremidades.

L&R ha desarrollado la película de drenaje Suprasorb CNP específicamente para uso en abdomen abierto. La capa de protección de órganos con efecto de drenaje se puede modelar, pero no se resbala; además, es muy bien tolerada y puede usarse directamente sobre órganos y estructuras delicadas.


La estructura de la película de drenaje previene el colapso del drenaje de la cavidad entre las dos capas, gracias en parte a los numerosos poros en forma de cono. En consecuencia, la distribución de la succión por toda la superficie hasta los bordes de la herida queda garantizada y la película de drenaje transporta de forma efectiva el exudado, aún proveniente de regiones profundas de la cavidad abdominal.

La película de drenaje puede cortarse a cualquier tamaño necesario sin arriesgar su efectividad.

Visión global de las ventajas

- protege órganos y estructuras delicadas
- magnífica capacidad de drenaje gracias al transporte del exudado por toda la superficie de la película
- se puede cortar y dar forma según sea necesario
- la geometría idéntica de los lados aumenta la seguridad al posicionar la película

Funcionamiento de la película de drenaje

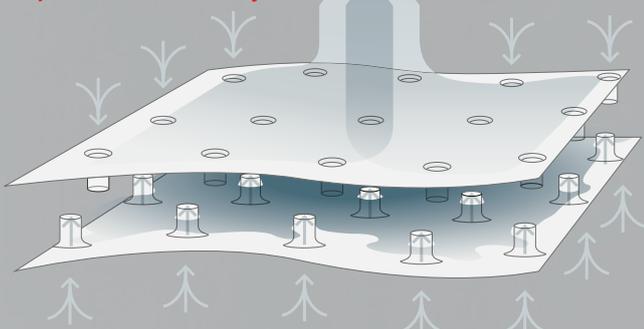

Suprasorb®

CNP EasyDress

Innovación 3D en terapia de presión negativa para las extremidades.

Cubrir – retener – iniciar terapia. Usar EasyDress no puede ser más simple. Gracias a su diseño en 3D y al material especialmente flexible, el apósito para terapia de presión negativa se vuelve hermético considerablemente más rápido que otros métodos adhesivos convencionales. Eso se traduce en un ahorro de tiempo de hasta el 90 %.³

EasyDress se puede aplicar sin ayuda. Se encuentra disponible en diferentes tamaños y puede cortarse a la longitud necesaria, lo que, por un lado, garantiza una adaptación excelente a las diferentes anatomías de las extremidades superiores e inferiores y, por otro lado, permite tratar heridas en ubicaciones incluso más difíciles de acceder.

EasyDress destaca por su magnífica comodidad de uso y por el hecho de que la piel intacta circundante permanece protegida. El confort y la funcionalidad del producto se traducen en opiniones considerablemente más favorables que en el caso de los tratamientos convencionales y, por lo tanto, en niveles más altos de aceptación entre los usuarios.

El 92 %

de los usuarios volvería a utilizar EasyDress inmediatamente.³

Visión global de las ventajas

- ahorro de tiempo de hasta el 90 % al aplicar el apósito³
- ocluye las heridas de las extremidades de forma fácil y fiable
- aumenta la comodidad de uso para el paciente



EasyDress se encuentra disponible en los tamaños S/M/L. El EasyDress Fixateur Externe es la 4ª dimensión de la gama EasyDress.

Suprasorb®

CNP EasyDress Fixateur Externe

Para la terapia de presión negativa en extremidades que están siendo tratadas con un fijador externo.

EasyDress Fixateur Externe se utiliza para crear un sellado sencillo, rápido y fiable para la terapia de presión negativa. Añade una 4ª dimensión a los tamaños S, M y L del EasyDress probado y ensayado.


El EasyDress Fixateur Externe tiene 1,20 metros de longitud y 1,50 metros de circunferencia. Este tamaño se puede utilizar de forma universal en extremidades que están tratadas con diferentes tipos de fijadores externos.

Se ha mantenido el principio «Colocar, fijar y listo» de EasyDress. A diferencia de los métodos adhesivos convencionales, el EasyDress Fixateur Externe permite un sellado fácil, rápido y fiable de heridas en extremidades tratadas con un fijador externo.

EasyDress Fixateur Externe permite aplicar la terapia de presión negativa en extremidades tratadas con un fijador externo donde esto no sería posible en otras circunstancias.

Visión global de las ventajas

- sellado sencillo, rápido y fiable
- permite aplicar la terapia de presión negativa donde antes no habría sido posible
- ofrece protección frente a gérmenes

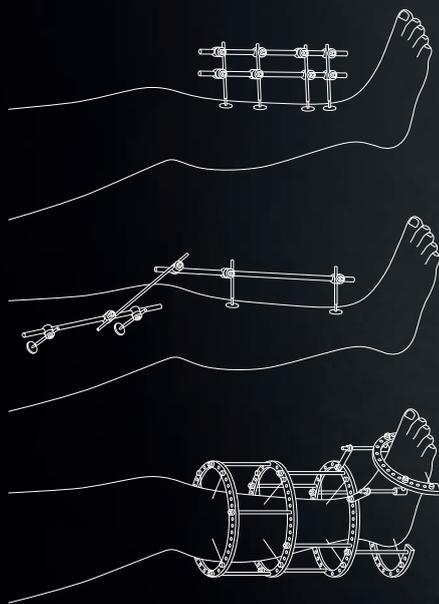

Aplicable de forma universal

Puede utilizarse con diferentes modelos de fijador externo.

Suprasorb®

CNP Kits –

soluciones personalizadas para hospitales.

Ya sea en el quirófano o en el pabellón, con el Kit Suprasorb CNP y el Kit PLUS siempre tiene a la mano todas las herramientas necesarias para una terapia de presión negativa efectiva, estériles y empacadas, listas para usar. No es necesario buscar componentes, no es preciso almacenar piezas pequeñas y no hay un exceso de productos desechables. Además, los procesos de documentación, pedidos y administración son considerablemente más sencillos.

- promueve flujos de trabajo que ahorran tiempo
- permite una planeación precisa de los requisitos
- posibilita una manipulación eficiente
- ofrece una mayor seguridad
- otorga una alta transparencia de los costos

Kit PLUS Apósito de espuma



Los símbolos relativos al contenido y al tamaño del empaque le ayudan a encontrar el Kit CNP de forma rápida.

Los productos clave «apósito de espuma» y «gasa» forman la base del concepto del Kit CNP, que se encuentra disponible en los tamaños S, M y L.

Las soluciones Kit PLUS también incluyen instrumentos de un solo uso estériles, como tijeras y pinzas.

El «Kit PLUS Abdominal», con su película de drenaje Suprasorb CNP de alta tecnología, es un kit especial para tratar el abdomen abierto que completa la atractiva gama CNP Kit.



Kit PLUS Abdominal





People.Health.Care.

Nuestra capacitación, el éxito de su terapia.

La unidad de terapia de presión negativa Suprasorb CNP P3 es realmente fácil de usar. Nuestros especialistas en CNP le enseñarán su manipulación a usted y a su equipo, por lo que enseguida podrán poner en marcha su nuevo sistema. Estaremos complacidos de atenderle personalmente durante la fase de preparación y durante el uso. Basta con que se ponga en contacto con nosotros. En cualquier momento.

Referencias:

- 1) El 89 % de los especialistas están de acuerdo con esta afirmación.
- 2) Basado en estudios in vitro.
- 3) M. Duft, D. Ostapowicz, S. de Lange, K. Griebhammer, M. Abel: Audit on the usability, user and patient satisfaction of tubular bandage, Multi-center international post-marketing clinical study under real conditions.



People.Health.Care.

Simone Dagach
Tlfn. +56 9 5887 2570
e-mail: simone.dagach@at.LRmed.com

Margarita Ortiz
Tlfn. +57 322 9485 689
e-mail: margarita.ortiz@at.LRmed.com